

GEBRAUCHSANWEISUNG

CARRAVIR® PROTECT

NASEN- UND RACHENSPRAY

Was ist CARRAVIR® PROTECT?

Carravir® Protect ist ein Nasen- und Rachenspray, welches einen schützenden Film gegen Erkältungsviren bildet und durch anhaltende Befeuchtung der Nasen-, Mund- und Rachenschleimhaut die natürliche Abwehr des Körpers unterstützt.

CARRAVIR® PROTECT kann unterstützend zur Vorbeugung und Behandlung von Schnupfen bzw. Erkältungskrankheiten mit viraler Ursache eingesetzt werden.

Carravir® Protect kann zudem zur vorbeugenden und anhaltenden Befeuchtung der Nasen-, Mund- und Rachenschleimhaut verwendet werden.

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab einem Jahr.

Carravir® Protect enthält **kein Konservierungsmittel**. Ein Sterilfilter gewährleistet die Sterilität der Lösung auch nach wiederholter Anwendung.

Was enthält CARRAVIR® PROTECT?

Carravir® Protect ist eine klare, farblose, viskose Lösung ohne Geruch.

1 ml Lösung enthält 1,2 mg Iota-Carrageen (Carragelose®), Natriumchlorid und gereinigtes Wasser.

Welche Eigenschaften hat CARRAVIR® PROTECT?

Schnupfen und Erkältungskrankheiten werden überwiegend durch Viren verursacht, die meist durch die Nase und den Mund in den Körper eindringen. Sind sie in den Nasen- und/oder Rachenraum eingedrungen, können sie sich an der Schleimhaut festsetzen, in die umliegenden Schleimhautzellen eindringen, sich vermehren und wiederum ausbreiten. Folge davon sind typische Erkältungssymptome wie verstopfte oder rinnende Nase, Hals- und/oder Kopfschmerzen, Husten, etc.

Eine feuchte Nasen-, Mund- und Rachenschleimhaut **unterstützt die natürliche Abwehr gegen Viren** und Umwelteinwirkungen. Die Filterfunktion der Nase, d.h. das Zurückhalten der in der Atemluft vorhandenen Partikel (Viren, Staub, etc.) kann jedoch nur durch eine feuchte Nasenschleimhaut mit funktionierendem, gesundem Flimmerepithel erfüllt werden.

Eine trockene und gereizte Nasen-, Mund- und Rachenschleimhaut kann Folge der allgemeinen Luftverschmutzung sowie des häufigen Aufenthaltes an Orten mit geringer relativer Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in beheizten oder klimatisierten Räumen, Autos, Zügen oder Flugzeugen, sein. Beide Faktoren - Luftverschmutzung und geringe Luftfeuchtigkeit - bewirken ein Austrocknen der Nasen-, Mund- und Rachenschleimhaut. Auch eine starke Beanspruchung des

Rachenraumes, z.B. durch Rauchen, langes Sprechen oder Singen, kann mit einer Austrocknung der Mund- und Rachenschleimhaut einhergehen. Folgen davon sind dann oft Husten, Heiserkeit oder Halsschmerzen.


Carravir® Protect enthält Carragelose®, eine Substanz, die aus Rotalgen aus dem Meer gewonnen wird, mit zweifach positivem Effekt:

- **CARRAVIR® PROTECT bildet eine schützende Barriere gegen Erkältungsviren.** Erkältungskrankheiten werden durch eine große Anzahl verschiedener Virusarten, wie z.B. Rhinoviren und Coronaviren ausgelöst. Carragelose® umhüllt unspezifisch diese Erkältungsviren und verhindert damit das Anheften an der Schleimhaut. Die Vermehrung und Ausbreitung der Erkältungsviren, die die Atemwege infizieren wird reduziert. Somit wird die Menge an Viren, welche die Körperzellen infizieren können, eingeschränkt. **Vergleichbar mit Erkältungsviren hat sich die unspezifische Virenumhüllung durch Carragelose® auch für SARS-CoV-2 in vitro gezeigt.** Auch wenn Carravir® Protect eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vollständig verhindert, kann es das Risiko einer Infektion und Virusverbreitung stark reduzieren.
- Carravir® Protect bildet einen feuchtigkeitspendenden Schutzfilm, der durch Carragelose® länger auf der Nasen-, Mund- und Rachenschleimhaut verbleibt und als physikalische Barriere gegen äußere Einflüsse wirkt. Es wird die natürliche Abwehr gegen Viren unterstützt.

Wann wird CARRAVIR® PROTECT verwendet?

- Dient zur Vorbeugung und unterstützenden Behandlung von virusbedingten Infektionen der oberen Atemwege wie Schnupfen und Erkältungskrankheiten sowie SARS-CoV-2.
- Kann die Dauer einer Erkältung verkürzen, Erkältungssymptome lindern und deren Wiederaufflammen reduzieren bzw. das Risiko einer Neuinfektion vermindern.
- Dient zur vorbeugenden und anhaltenden Befeuchtung der Nasenschleimhaut und somit zur Prophylaxe und unterstützenden Behandlung aller Beschwerden, die infolge trockener oder gereizter Nasenschleimhaut bestehen.
- Dient zur Befeuchtung der Mund- und Rachenschleimhaut, z.B. bei Husten, Heiserkeit oder trockener Atemluft.
- Hilft bei der Vorbeugung und unterstützenden Behandlung aller Beschwerden, die infolge trockener oder gereizter Mund- und Rachenschleimhaut bestehen, verursacht z.B. durch Rauchen, langes Sprechen oder Singen.

So funktioniert CARRAVIR® PROTECT

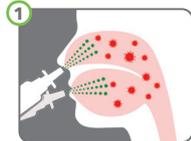

1 Sprühen (Nase / Rachen)



2 Schutzfilm legt sich auf Nasen- Rachenschleimhaut und umhüllt Viren



3 Reduziert Eindringen von Erkältungsviren

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG

WANN	WIE OFT (mindestens)	WO
Zur Vorbeugung Dosierung täglich		
Erwachsene	3 x 2 Sprühstöße	pro Nasenloch und bei Bedarf in den Rachen
Kinder	3 x 1 Sprühstoß	

Bei den ersten Anzeichen einer Erkältung	Dosierung täglich	
Erwachsene	3 x 2 Sprühstöße	pro Nasenloch und bei Bedarf in den Rachen
Kinder	3 x 1 Sprühstoß	

Der Beginn der Behandlung sollte so rasch wie möglich nach Auftreten der ersten Erkältungssymptome erfolgen und bis zum Abklingen fortgesetzt werden.

Zur Befeuchtung der Schleimhaut	Dosierung täglich	
Erwachsene	nach Bedarf	pro Nasenloch und bei Bedarf in den Rachen
Kinder	nach Bedarf	

Wann soll CARRAVIR® PROTECT nicht angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Präparates.

Mögliche Nebenwirkungen

Es sind bislang keine Wechsel- oder Nebenwirkungen, abgesehen von sehr seltenen Fällen von Überempfindlichkeiten wie Nasenbluten, bekannt.

Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Produkten wurden nicht durchgeführt.

Besondere Hinweise zur sicheren Anwendung

Carravir®Protect hat eine lokale Wirkung und wird nicht vom Körper aufgenommen. Carravir® protect kann auch während Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie unbedingt einen Arzt/Ärztin aufsuchen. Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt an den Hersteller und an die zuständige Behörde in Österreich. Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheitserregern sollte eine Sprühflasche jeweils nur von ein und derselben Person benutzt werden. Für Kinder unerreichbar aufbewahren!



Weitere Hinweise zu CARRAVIR® PROTECT

- Kann über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Es besteht kein Gewöhnungseffekt oder Risiko einer Überdosierung.
- Ist ein Medizinprodukt.
- Wirkt nicht abschwellend.
- Enthält kein Schmerzmittel, kein Konservierungsmittel, keine tierischen Bestandteile oder Treibhausgas.
- Ist laktose- und glutenfrei und kann von Diabetikern angewendet werden.

Packungsgröße

Flasche mit 30 ml mit Sprühaufsatz; 1 Sprühstoß = 0,07 ml Lösung (insgesamt 428 Sprühstöße).

Haltbarkeit

36 Monate ab Herstellung. Durch das spezielle Filtersystem bleibt die Lösung auch nach wiederholter Anwendung steril. Carravir® Protect kann daher bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum verwendet werden.

Lagerungshinweise

Zwischen 5°C und 30°C lagern. Lichtschutz erforderlich.

Hersteller

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5, 23562 Lübeck, Deutschland

Vertrieb

Sanova Pharma GmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien, Österreich

Stand der Information: Juli 2020

